



TENAフォーメンの交換方法

ご使用のポイント

- TENAフォーメンはTENAフィックス、TENAフィックスコットンスペシャルとあわせてお使いください。
- ご自分の下着でご使用になる場合は、パッドの安定感を保つため、ブリーフタイプの下着をお使いください。
- TENAフォーメンは、1個ずつ個別包装されています。ご使用後はパッケージに包んで処分してください。


●ご自分で交換する場合




① パッケージを開けます。



② パッドを広げてテープをはがします。

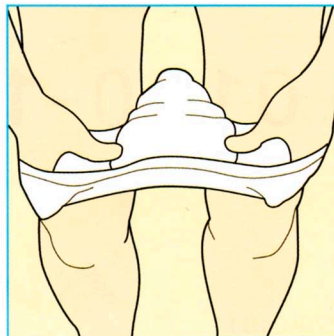

③ パッドの幅の広いほうを上にして、粘着面を下着に合わせます。

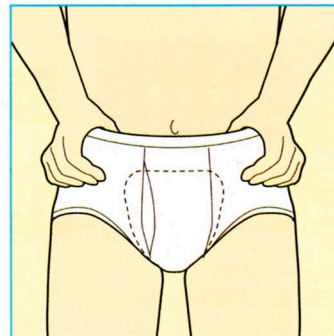

④ パッドをしっかりおさめ、下着を引き上げます。